



Ez SHOT HD

Wireless Autofocus Intraoral Camera

Bedienungsanleitung

GER

1. Einleitung	02	8. Desinfektion, Reinigung, Wartung	16
1.1 Funktionen	02	8.1 Desinfektion und Reinigung	16
1.2 Beschreibung	02	8.2 Wartung	16
1.3 Überblick	02		
2. Allgemeine Informationen	03	9. Fehlersuche und -beseitigung	17
2.1 Konformitätsbewertung	03		
2.2 Allgemeine Hinweise	03	10. Technische Daten	18
2.3 Hinweise zum Medizinprodukt	03		
2.4 Elektronik-Altgeräte-Entsorgung	04	11. Zubehör	19
2.5 Bestimmungsgemäße Verwendung	04		
2.6 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung	04	12. Garantie	19
2.7 Verwendung von Zusatzgeräten	04		
3. Sicherheitsinformationen	05	13. Garantiekarte	20
3.1 Symbole	05		
3.2 Bemerkungen und Hinweise	05		
3.3 Installation und Anschluss	06		
3.4 Inbetriebnahme	07		
3.5 Instandhaltung	08		
4. Lieferumfang	09		
5. Teile und Funktionen	10		
6. Installation	11		
6.1 Receiver	11		
6.2 Verbindung zwischen Netzteil/Ladestation	12		
6.3 Aufladen	12		
6.4 Kamera mit dem Receiver verbinden	13		
6.5 DrsViewer2 installieren	13		
7. Gebrauch der Kamera	14		
7.1 Gerät einschalten	14		
7.2 Bild auslösen	14		
7.3 LED-Helligkeit einstellen	14		
7.4 Full Auto-Fokus/ Semi Auto-Fokus	15		

1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieser Kamera entschieden haben.

Die folgende Anleitung wurde erstellt, um Ihnen die notwendigen Informationen für den Betrieb, Wartung und Einhaltung der Sicherheitsstandards zu geben.

1.1 Funktionen


- Schnelles digitales Wireless
- Autofokus und manueller Fokus durch Flüssiglinse
- Die Helligkeit der LEDs ist einstellbar
- Mit fast jeder Praxis-Software kompatibel (Bildverarbeitungs-Programm)
- Zahnärztliches Bildverarbeitungs-Programm enthalten (DrsViewer2)

1.2 Beschreibung


Dieses Gerät ist eine intraorale Kamera, die dazu verwendet wird, Bilder im Inneren der Mundhöhle aufzunehmen.

1.3 Überblick

1) Camera

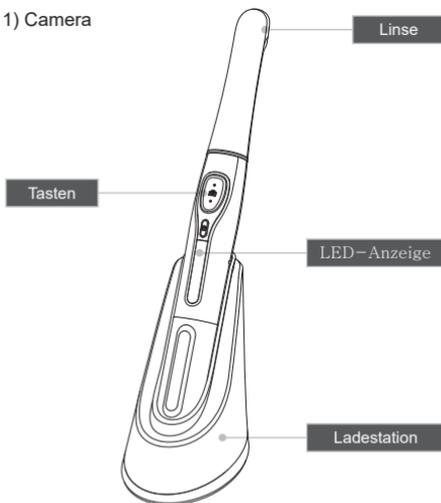

2) Receiver part

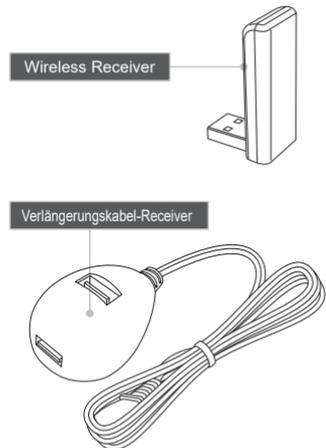

2.1 Konformitätsbewertung

Das Produkt wurde nach der Richtlinie 93/42/EWG der europäischen Union einem Konformitätsbewertungsverfahren unterzogen. Es entspricht den geforderten grundlegenden Anforderungen dieser Bestimmungen. Die RoHS II Richtlinie wurde umgesetzt.

2.2 Allgemeine Hinweise

Die Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Gerätes. Sie ist für den Anwender zugänglich bereitzustellen. Das Beachten der Gebrauchsanweisung ist Voraussetzung für den bestimmungsgemäßen Gebrauch und die richtige Bedienung des Gerätes. Neue Mitarbeiter müssen eingewiesen werden. Die Gebrauchsanweisung ist an Nachfolger zu übergeben.

Die Sicherheit des Anwenders/Patienten und ein störungsfreier und sicherer Betrieb ist nur bei Verwendung von Original-Geräteteilen gewährleistet. Außerdem darf nur das in der Gebrauchsanweisung aufgeführte oder von der Firma Good Doctors Germany GmbH hierfür freigegebene Zubehör verwendet werden. Bei Verwendung von nicht freigegebenem Zubehör kann die Firma Good Doctors Germany GmbH keine Gewährleistung für den sicheren Betrieb und die sichere Funktion übernehmen. Alle Ansprüche wegen hierdurch entstehender Schäden sind ausgeschlossen.

Die Firma Good Doctors Germany GmbH ist für die Geräte im Hinblick auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Funktion nur verantwortlich, wenn Reparaturen durch die Firma Good Doctors Germany GmbH oder durch eine von der Good Doctors Germany GmbH dazu autorisierten Stelle ausgeführt werden. Außerdem muss das Gerät in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung verwendet und betrieben werden.

Die Gebrauchsanweisung entspricht der Ausführung des Gerätes und dem Stand der Technik zum Zeitpunkt des ersten Inverkehrbringens. Für angegebene Schaltungen, Verfahren, Namen, Softwareprogramme und Geräte sind alle Schutzrechte vorbehalten.

Die Übersetzung der Gebrauchsanweisung wurde nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für Übersetzungsfehler kann nicht übernommen werden.

Der Nachdruck der Gebrauchsanweisung, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Good Doctors Germany GmbH gestattet.

Die Good Doctors Germany GmbH übernimmt für Schäden, die während einer Rücksendung entstehen, keine Haftung. Dies gilt auch für Rücksendungen während der Gewährleistung.

2.3 Hinweise zum Medizinprodukt

Das Produkt ist ein medizintechnisches Gerät. Es darf nur von Personen angewendet werden, die durch ihre Ausbildung oder Kenntnisse die Gewähr für eine sachgerechte Handhabung bieten.

2.4 Elektronik-Altgeräte-Entsorgung

1. Sammlung

Nutzer von Elektro- und Elektronikgeräten sind entsprechend den länderspezifischen Regelungen verpflichtet, Altgeräte getrennt zu sammeln. Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht gemeinsam mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Die getrennte Sammlung ist Voraussetzung für das Recycling und die Verwertung, wodurch eine Ressourcenschonung der Umwelt erreicht wird.

2. Rückgabe- und Sammelsysteme

Im Entsorgungsfall Ihres Gerätes darf das Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Die Good Doctors Germany GmbH hat dazu Entsorgungsmöglichkeiten geschaffen.


Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Good Doctors Germany GmbH oder Ihren Händler.

3. Entnahme des Akkus zur Entsorgung

Zur Entsorgung des Akkus wenden sich an die Good Doctors Germany GmbH oder Ihren Händler.

4. Bedeutung der Symbole

Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die mit diesen Symbolen gekennzeichnet sind, dürfen gemäß EU-Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

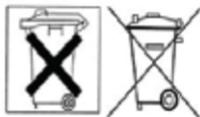

2.5 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Kamera ist ausschließlich für die Erstellung von intra- und extraoralen Aufnahmen in Zahnarztpraxen bestimmt.

2.6 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.

2.7 Verwendung von Zusatzgeräten

An die Kamera dürfen nur Zusatzgeräte (Computer) angeschlossen werden, die der Norm IEC 60950-1 (EN 60950-1) entsprechen. Die Computer-Anlage muss sich außerhalb der Patientenumgebung (1,5 m vom Patientenuntersuchungsbereich) befinden. Falls dies nicht gewährleistet ist, muss die verwendete Computer-Anlage nach IEC 60601-1 (EN 60601-1) aufgebaut werden.

3 Sicherheitsinformationen

Lesen Sie folgende Seiten vor dem Anschließen und der Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch. Wie bei allen technischen Geräten sind auch bei diesem Gerät einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit nur dann gewährleistet, wenn bei der Bedienung sowohl die allgemein üblichen Sicherheitsvorkehrungen als auch die speziellen Sicherheitshinweise beachtet werden.

3.1 Symbole



Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Personen- oder umfangreichen Sachschäden führen kann.



Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten Personen- oder Sachschäden führen kann.

3.2 Bemerkungen und Hinweise



Beachten Sie, dass mögliche Störungen auftreten können, wenn die Beschreibung ignoriert wird.



Die ergänzenden Informationen können die Bedienung erleichtern.

3.3 Installation und Anschluss



Warnung

- Schließen Sie erst das Netzteil an das Stromnetz an, bevor Sie es mit der Aufladestation verbinden.
- Schützen Sie das Handstück und Ladegerät vor Flüssigkeiten, um einen elektrischen Schlag oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Stellen Sie das Ladegerät auf eine ebene und stabile Oberfläche. Lassen Sie das Handstück und das Ladegerät nicht fallen, um interne Defekte – die zu Überhitzungen oder Feuer führen können – zu vermeiden.
- Stellen Sie das Stromkabel nicht in der Nähe von Gasbrennern oder sonstigen Wärmequellen auf. Sollte dieses dennoch beschädigt sein, ersetzen Sie es durch ein neues, um Kurzschlüsse zu vermeiden.



Vorsicht

- Keine Verwendung oder Lagerung des Gerätes bei hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlichteinfall, die interne Schaltung kann sonst überhitzen.
- Schließen Sie das Netzkabel an einer staubfreien Steckdose an.
- Berühren Sie nicht die Kontakte des Ladegerätes oder des Akkus mit den Fingern, leitenden Gegenständen wie Metalldraht oder einer Sicherheitsnadel. Es könnte sonst zu einem Stromschlag oder Feuer kommen.
- Verwenden Sie nur das Original-Zubehör (Netzteil und Ladestation), um ein Entzünden oder eine Fehlfunktion des Gerätes zu vermeiden.

3 Sicherheitsinformationen

3.4 Inbetriebnahme



Warnung

- Schließen Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen an, dies kann sonst zu einem elektrischen Schlag führen.
- Im Falle einer undichten Batterie oder teilweisen Verfärbungen/Verformungen des Handstücks beenden Sie sofort die Anwendung.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker heraus, sollte sich das Ladegerät verfärben. Kontaktieren Sie Ihren Händler.
- Sollten Ihre Augen mit Batterieflüssigkeit in Berührung gekommen sein, spülen Sie diese unverzüglich mit sauberem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Personen, die einen Herzschrittmacher tragen. Es könnte zu Fehlfunktionen des Herzschrittmachers kommen.
- Aus hygienischen Gründen muss die WhicamStory3 beim Einsatz im intraoralen Bereich mit den beiliegenden Schutzhüllen verwendet werden.



Vorsicht

- Vermeiden Sie Beschädigungen oder Krafteinwirkungen am Netzkabel, da dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen könnte.
- Sollte Ihre Haut oder Ihre Kleidung mit Batterieflüssigkeit in Berührung kommen, waschen Sie diese unverzüglich mit sauberem Wasser, um Hautschäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere Zwecke als den zahnärztlichen Gebrauch.
- Trennen Sie vorsichtshalber das Ladegerät vom Strom, wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht benutzen.

3.5 Instandhaltung



Warnung

- Verwenden Sie nur Original-Zubehör, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Öffnen Sie weder Kamera, Ladestation oder das Netzteil. Dies kann zu Verletzungen, elektrischen Schlägen oder Feuer führen.
- Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät immer vom Handstück getrennt ist, bevor Sie es reinigen.



Vorsicht


- Benutzen Sie keine Lösungsmittel wie Öl, Benzin oder Aceton zum Reinigen. Es kann zu Fehlfunktionen kommen. Beachten Sie das Kapitel Desinfektion und Reinigung.
- Benutzen Sie bei jeder Anwendung am Patienten eine neue Schutzhülle.

4 Lieferumfang


Bitte prüfen Sie den unten aufgeführten Inhalt bezüglich seiner Vollständigkeit.




Kamera

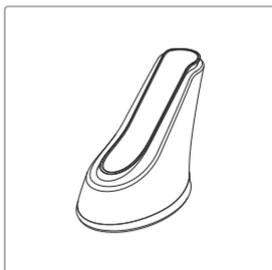

Aufladestation

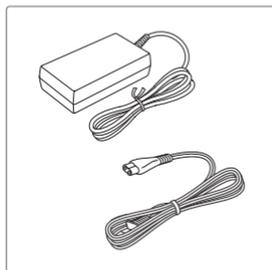


Netzteil

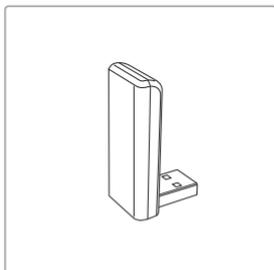


Receiver




USB-Verlängerungskabel
für Receiver

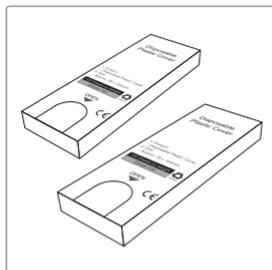

ca. 200 Schutzhüllen

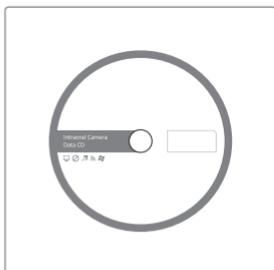


Treiber CD

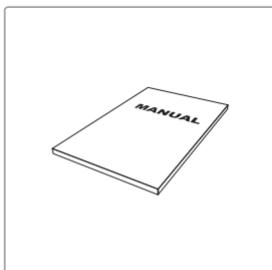

Bedienungsanleitung

5 Teile und Funktionen

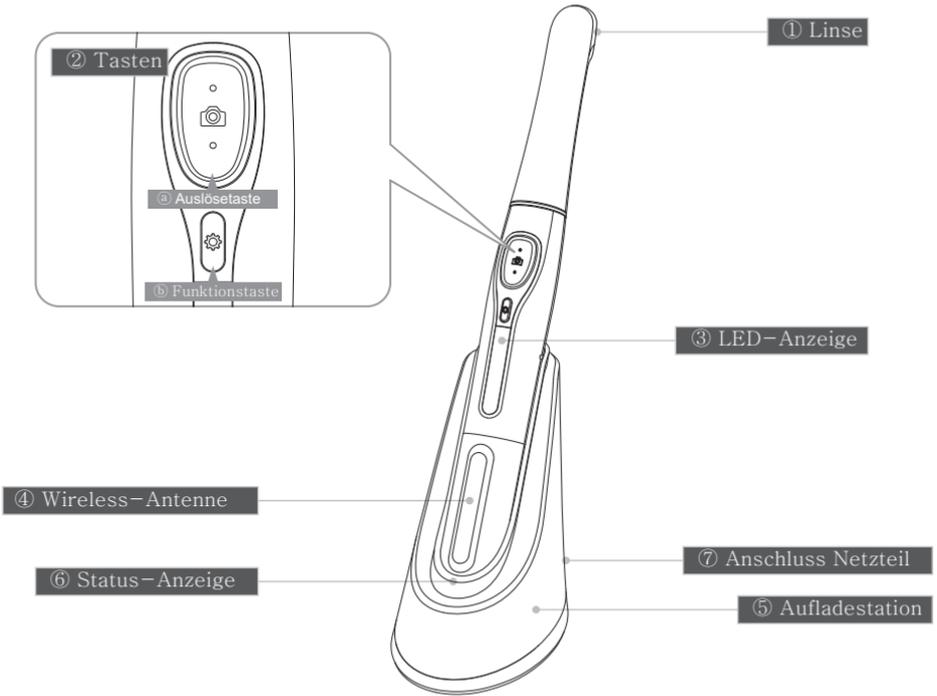

① Linse

② Tasten

- a Auslösetaste
 - Bild auslösen, fokussieren, auswählen
- b Funktionstaste
 - Setting-Modus

③ LED Anzeige

- Zeigt den Status des Gerätes

④ Wireless Antenne

- Die Antenne sendet die Daten zum Empfänger

⑤ Aufladestation


- Lädt die Kamera auf.

⑥ Status-Anzeige

- Rot: Wird geladen
- Blau: aufgeladen

⑦ Anschluss Netzteil

- Anschluss an das Netzteil

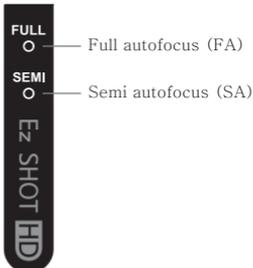

6 Installation

6.1. Receiver-Installation (Achtung für Windows 10 gibt es einen extra Treiber)


1) Installieren Sie den Receiver-Treiber



Folgen Sie den Anweisungen des Setup-Programms.

Der Treiber befindet sich auf der CD im Ordner **Receiver Driver**.

2) Verbinden Sie den Receiver mit dem PC.

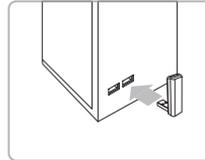


Verbinden Sie den Receiver mit dem USB-Port.



Verwenden Sie die Verlängerung, wenn Ihr PC nicht freistehend ist.

3) Warten Sie, bis sich der Receiver mit dem PC verbunden und installiert hat.

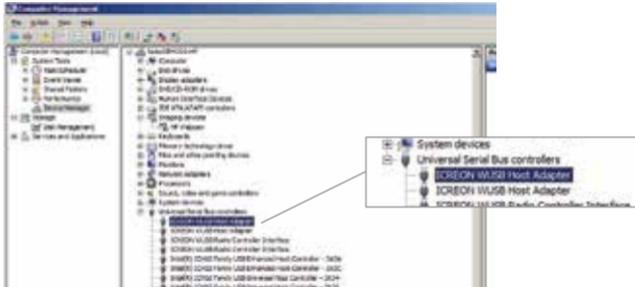

4) Starten Sie den "Wireless USB Manager" (auf dem Desktop oder rechts unten in der Taskleiste).



Sie brauchen den Wireless USB-Manager nach der erstmaligen Einrichtung nicht mehr beachten.

< Symbol auf dem Desktop >



Die Kamera ist richtig angeschlossen wenn unter Verbunden folgendes steht:
Verbunden, Hub-Gerät (2 angeschlossene Geräte)




Die Kamera ist nicht verbunden

6 Installation

6.2. Verbindung zwischen Netzteil und Ladestation

- 1) Verbinden Sie das Netzteil mit der Ladestation
- 2) Verbinden Sie das Netzteil mit einem Stromanschluss

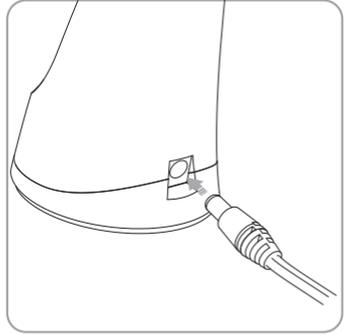


Bemerkung

- Verwenden Sie nur das Original Netzteil.
- Die Aufladestation blinkt Blau und Rot, wenn Sie mit Strom verbunden wird.

6.3. Aufladen

- Legen Sie die Kamera wie auf dem Bild zu sehen, vertikal in die Aufladestation
- Rotes Licht : Wird geladen
- Blaues Licht : Voll geladen

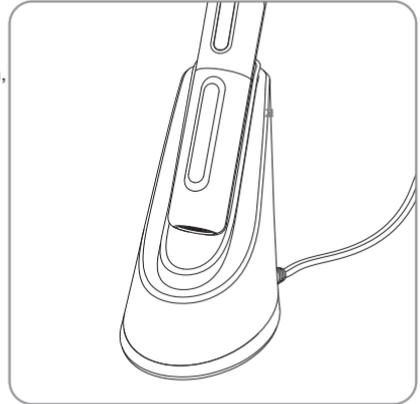

Bemerkung

- Sollte die Batterie stark entladen sein, kann es sein, dass am Anfang des Ladevorgangs die Rote Lampe flackert. Dies ist keine Fehlfunktion.



Hinweis

- Um die Kamera komplett zu laden, braucht es ca. 1 Stunde und 40 Minuten.

6 Installation

6.4. Kamera mit Receiver verbinden

- 1) Schalten Sie die Kamera mit einem Klick auf die Auslösetaste ein.
Sie sehen die Kamera im Wireless USB-Manager.



Bemerkung

Es kann sein, dass die Kamera eine Internetverbindung bei der erstmaligen Installation benötigt. Der Receiver funktioniert nicht mit Windows XP 64 bit.

2) Verbindung

- Klicken Sie mit der linken Maustaste im USB-Manager zwei Mal auf das Gerät.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste einmal auf das Gerät und wählen Sie "als Standard festl." aus.
Die Kamera verbindet sich ab jetzt automatisch mit dem PC, wenn Sie diese einschalten.



Hinweis



Wenn das Gerät mit einem "Stern" markiert ist, ist es als Standard festgelegt und verbindet sich ab jetzt automatisch.



Bemerkung

Wenn der Receiver-Treiber nicht richtig installiert ist oder die Kamera zu weit vom Receiver entfernt ist, wird Ihnen das "Nicht verbunden Zeichen" im Wireless USB Manger angezeigt. Bitte überprüfen Sie den Receiver, Treiber und die Kamera.

6.5. DrsViewer2 installation

- Wenn Ihr Praxisprogramm keine Bildverarbeitungs-Software besitzt, benutzen Sie das auf der CD enthaltene Programm.



< Installation DrsViewer2 >



Hinweis

Wenn Sie die Kamera in Ihre Praxis-Software integrieren wollen, fragen Sie Ihren Händler nach einer Anleitung zur Integration.

7 Gebrauch der Kamera

7.1. Gerät einschalten

- Drücken Sie die Auslöse-Taste. Die Kamera schaltet sich ein, die LEDs blinken und es ertönt ein Ton.

- Falls die Kamera nicht mit dem Receiver verbunden ist, blinkt die LED Anzeige, solange bis die Kamera eine Verbindung hergestellt hat.



- Wenn die Kamera nicht mit dem Receiver verbunden ist, schaltet sie sich nach zwei Minuten aus.

7.2. Bild Auslösen


- Full Auto: berühren Sie die Taste leicht, um ein Bild auszulösen (Halber Klick)
- Semi Auto: Berühren Sie die Taste leicht um das Bild zu fokussieren, (Halber Klick) Halten Sie die Taste eine Sekunde, um das Bild auszulösen oder drücken Sie die Taste fest (ganzer Klick).



Voreingestellt ist der Semi-Autofokus, die Auslösetaste ist die "Leertaste". Wenn Sie die Kamera in Ihre Praxis-Software integrieren möchten, müssen Sie die richtige Auslösetaste festlegen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an Ihren Händler.

7.3 LED-Helligkeit einstellen.

- Drücken Sie die Mode-Taste, die LED-Helligkeit wechselt.

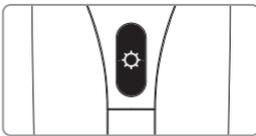

Weiß LEDs aus ⇒ Red LEDs aus ⇒ Green Helligkeit Stärke.1 ⇒ Blue Helligkeit Stärke.2
(Schwarz & Weiß Modus)




Die Helligkeit kann nur im Live-Modus geändert werden. Nützlich z.B., wenn Sie mit einer Brillenlampe arbeiten.

7 Gebrauch der Kamera

7.4 Full Auto-Fokus/ Semi Auto-Fokus

- Um den Fokus zu wechseln, drücken Sie die Mode-Taste für einige Sekunden.

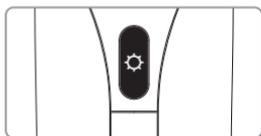

Full Auto-Fokus



Semi Auto-Fokus

Um ein Verwackeln der Bilder zu verhindern:



Hinweis

Automatisches Auslösen der Bilder:

- Full Auto-Fokus: Berühren Sie die Auslösetaste leicht, das Bild wird ausgelöst. Halten Sie den Finger auf der Auslösetaste, wird das Bild alle zwei Sekunden ausgelöst.

- Semi Auto-Fokus: Berühren und halten Sie den Finger leicht auf der Auslösetaste. Nachdem das Bild scharf gestellt wurde, löst die Kamera nach einer Sekunde aus. Halten Sie den Finger weiter auf der Taste, löst die Kamera erneut alle zwei Sekunden aus.

8 Desinfektion, Reinigung und Wartung

8.1 Desinfektion und Reinigung

- Verwenden Sie die Kamera nur mit den mitgelieferten Schutzhüllen, um eine hygienische Behandlung zu garantieren. Dies verhindert auch ein Eindringen von Flüssigkeiten in das Gerät, da die Kamera nicht wasserfest ist.
- Die Kamera und Zubehör können mit handelsüblichen Desinfektionstüchern mittels Wischdesinfektion gereinigt und desinfiziert werden, z.B. Dürr FD350.
- Achten Sie darauf, dass die Tücher nur feucht, nicht nass, sind. Das Desinfektionsmittel nicht direkt auf die Kamera sprühen. Das Desinfektionsmittel darf nicht in das Gerät gelangen! Beachten Sie die notwendige Einwirkzeit laut Herstellerangabe.
- Damit die Oberfläche des Handstückes nicht beschädigt wird, dürfen keine scharfen und abrasiven Reinigungsmittel verwendet werden.
- Die Kamera **nicht** autoklavieren, keine Tauch- oder Sprühdeseinfektion durchführen.

8.2 Wartung

- Die Kamera ist wartungsfrei.
- Schrauben Sie das Gerät nicht auf, da die Garantie sonst verfällt.
- Um die Batterie auszutauschen, kontaktieren Sie bitte einen autorisierten Händler oder die Good Doctors Germany GmbH. Da es sich um eine Lithium-Ionen Batterie handelt, ist dies im Normalfall nicht nötig.
- Laden Sie die Batterie vor dem Gebrauch auf.

Wenn die Kamera nicht richtig funktioniert, folgen Sie bitte den Anweisungen.

Problem	Ursache und Lösung
Taste funktioniert nicht	<p>Wenn Sie die Taste zu fest drücken, funktioniert diese nicht. Die Taste muss nur leicht berührt werden.</p> <p>Wenn die Kamera nicht mit dem PC verbunden ist oder nicht richtig erkannt wurde, funktionieren auch die Tasten nicht. Überprüfen Sie "5. Installation", "6. Gebrauch der Kamera".</p> <p>Die Auslöse-Taste für Ihr Praxisprogramm ist falsch eingestellt. Wenden Sie sich an Ihren Händler.</p>
Die LED-Anzeige funktioniert nicht	Die Batterie ist leer, bitte laden Sie die Kamera auf.
Die Kamera geht während der Aufnahme aus	Wenn der Batterie leer ist, geht das Gerät aus. Laden Sie bitte die Kamera auf.
Es kann kein Bild ausgelöst werden	Wenn die Auslöse-Taste in Ihrer Praxis-Software nicht funktioniert, wurde diese nicht oder falsch eingestellt. Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler nach der richtigen Tastenkombination.
Kein Live-Bild	<p>Wenn die Kamera nicht richtig mit dem PC verbunden ist, gibt es kein Live-Bild. Überprüfen Sie "5. Installation", "6. Gebrauch der Kamera".</p> <p>Wenn Sie eine Webcam oder eine TV-Karte angeschlossen haben, deaktivieren Sie diese und überprüfen Sie, ob das Problem behoben wurde.</p> <p>Wenn Sie die Kamera in Ihrer Praxis-Software laufen lassen, achten Sie darauf, dass Sie die richtige Kamera ausgewählt haben. Deaktivieren Sie gegebenenfalls andere Kameras (Webcam, etc.).</p> <p>Die Kamera unterstützt nur das MJPG (MPEG) Format. Wenn Sie die Kamera in Ihrer Praxis-Software verwenden, überprüfen Sie bitte die Einstellungen.</p> <p>Einige CODECS blockieren oder verzögern das Live-Bild. Deinstallieren Sie den CODEC (z.B. klite codec etc.).</p>

* Wenn Ihr Fehler hier nicht aufgeführt ist, kontaktieren Sie bitte den Händler Ihrer Kamera oder die Gruneworld GmbH (www.GoodDrs.de).

10 Technische Daten

■ Geräteklasse

Modell:	IC-EZAM80
Handelsmarke:	EZ Shot HD
Stromversorgung:	3.7V Lithium-Ionen Batterie
Receiver:	5V USB-Anschluss
Schutzart (DIN EN 60529)	IPX0
EMV (elektromagnetische Verträglichkeit):	IEC60601-2
Sicherheit:	IEC60601-1
Schutzklasse	Anwendungsteil Typ BF

■ Betriebsumgebung

Temperatur:	16°C bis 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% bis 80%
Luftdruck:	500 hPa bis 1060 hPa

■ Transport- und Lagerumgebung

Temperatur:	-20°C bis 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% R.H. bis 85% R.H.
Luftdruck:	500 hPa bis 1060 hPa

■ Zusätzliche Informationen

Kamera (Inklusive Kopf)	Betriebsspannung:	3.7V
	Abmessungen:	ca. 255 x 27 x 29 mm
	Gewicht:	ca. 89g
	Auflösung:	1280 x 720
Ladestation	Sensor/Linse:	CMOS / Flüssiglins
	Abmessungen:	ca. 110 x 105 x 68 mm
	Gewicht:	ca. 100 g
Schutzhüllen	Betriebsspannung:	5V
	Abmessungen:	ca. 32 x 100 mm
	Anzahl:	ca. 200 Stück
Netzteil	Material:	Polyäthylen
	Eingangsspannung:	AC 100 ~ 240 V
	Ausgangsspannung:	DC 5V 2A
	UL Nummer:	E333054

■ Minimale Systemanforderungen


Je besser der Monitor und die Grafikkarte, desto besser ist auch das Bild. Eine gute Kamera kann keine guten Bilder anzeigen, wenn der PC diese nicht wiedergeben kann.

PC System:	2.0 Ghz CPU, 4GB RAM
Betriebssystem:	ab Windows 7
USB Anschluss:	ab USB 2.0


(Bei der erstmaligen Installation kann es sein, dass Windows auf das Internet für die Treiber zugreifen muss).

* Die Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

11 Zubehör

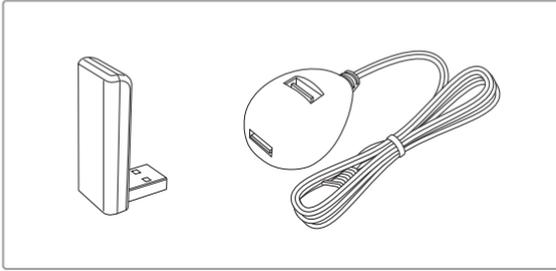

Receiver und Verlängerungskabel

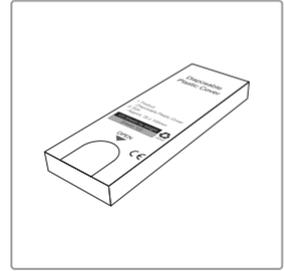


Schutzhüllen

12 Garantie

Wir bieten Ihnen 12 Monate Garantie auf dieses Produkt. Ausgeschlossen sind Verbrauchsmaterialien. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Die Kamera und der Kamerakopf haben einen Schocksensor, so dass nachvollzogen werden kann, wenn die Kamera heruntergefallen ist.

Seriennummer überprüfen.

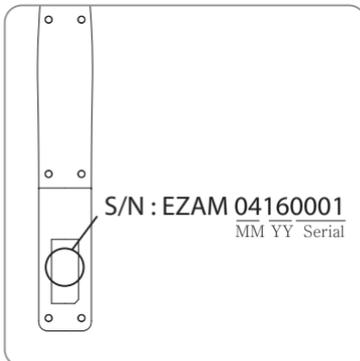

EC REP Good Doctors Germany GmbH

Gerhard-Domagk-Str.2, 53121 Bonn, Germany
TEL: +49(0)228/53 44 14 65 FAX: +49(0)228/53 44 14 66
Website: www.gooddrs.de E-mail : info@gooddrs.de

Good Doctors Co., Ltd.

#208, B-dong, 283 Bupyeong-daero, Bupyeong-gu
(Woolim Lions Valley, Cheongchoen-dong), Incheon,
21315, Republic of Korea
Tel : + 82 32 424 6325 Fax : + 82 32 424 6326
E-mail : good@gooddrs.com Website : www.gooddrs.com



We guarantee the quality of the product as follows

Name of product :

< Assurance details >

Name of model :

Customer information

- Office name :
- Office phone :

1. If there is any defect of manufacturer or product has any fault itself within the assurance period, it will be replaced with the same product.

2. Below cases are not effective for the free refund.
- Malfunction and damage according to user's carelessness
 - Malfunction and damage according to natural disaster such as fire, earthquake and flood etc.
 - Malfunction and damage according to user's intention or accident.
 - Malfunction and damage according to using incompatible product.

3. The manufacturer does not accept any liability resulting misuse.

Assurance period

- Date of purchase : from , , 20
- Product is for 1 year except accessories.



Good Doctors Co., Ltd.
 #208, B-dong, 283 Bupyeong-daero, Bupyeong-gu (Woolim Lions Valley, Cheongchoen-dong), Incheon, 21315, Republic of Korea
 Tel: +82 32 424 6325 Fax: +82 32 424 6326



Rev.2 - 06.2019

Good Doctors Co., Ltd.

Address. #208, B-dong, 283 Bupyeong-daero, Bupyeong-gu (Woolim Lions Valley, Cheongchoen-dong), Incheon, 21315, Republic of Korea
Tel. +82-32-424-6325 Fax. +82-32-424-6326 Website. www.gooddrs.com E-mail. good@gooddrs.com