


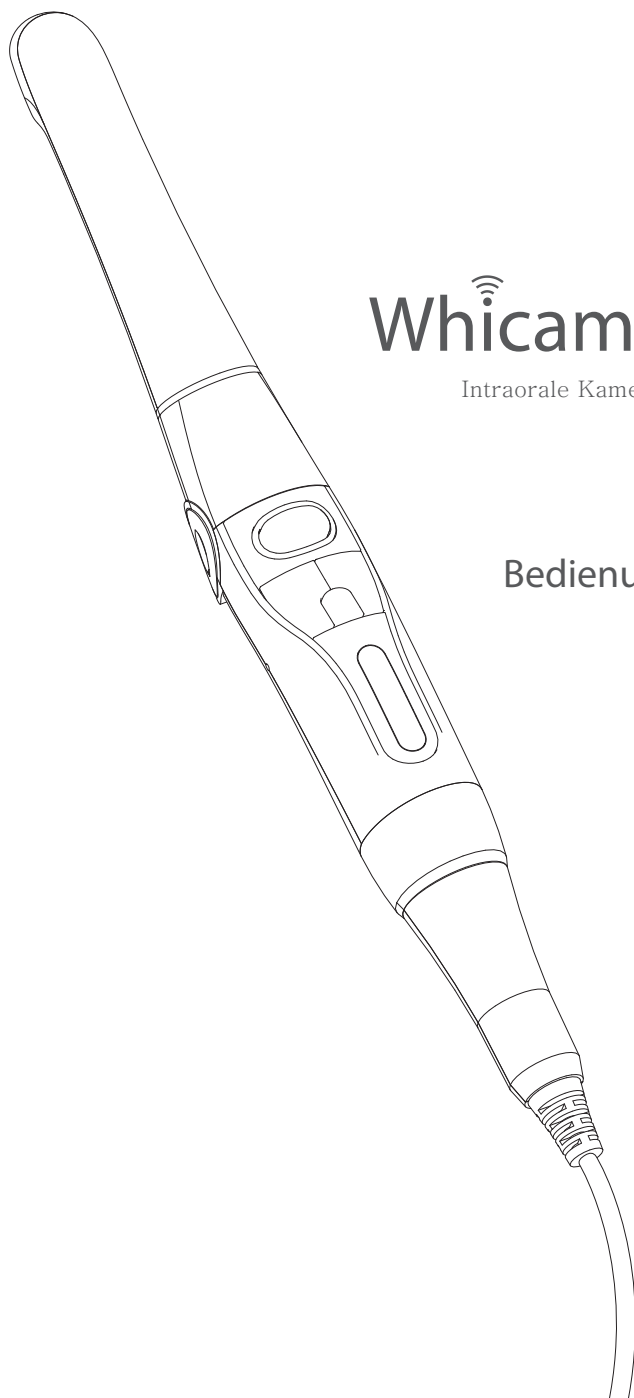

Whicam[®] Story3 CS

Intraorale Kamera mit integrierter Maus

kabelgebunden

Bedienungsanleitung

GER

CE

1. Einleitung	02	8. Desinfektion, Reinigung, Wartung	17
1.1 Funktionen	02	8.1 Desinfektion und Reinigung	17
1.2 Beschreibung	02	8.2 Wartung und Batterie ersetzen	17
1.3 Überblick	02		
2. Allgemeine Informationen	03	9. Fehlersuche und Beseitigung	18
2.1 Konformitätsbewertung	03	10. Spezifikation	19
2.2 Allgemeine Hinweise	03	10. Zubehör	20
2.3 Hinweise zum Medizinprodukt	03	11. Garantie	20
2.4 Elektronik-/Altgeräte-Entsorgung	04	12. Garantiekarte	21
2.5 Bestimmungsgemäße Verwendung	04		
2.6 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung	04		
2.7 Verwendung von Zusatzgeräten	04		
3. Sicherheitsinformationen	05		
3.1 Symbole	05		
3.2 Bemerkungen und Hinweise	05		
3.3 Installation und Anschluss	06		
3.4 Inbetriebnahme	07		
3.5 Instandhaltung	08		
4. Lieferumfang	09		
5. Teile und Funktionen	10		
6. Installation	11		
6.1 Kamerakopf befestigen	11		
6.2 Winkeleinstellung der Kamera	11		
6.3 USB-Anschluss	12		
6.4 Kamera mit dem PC verbinden	12		
6.5 DrsViewer2 installieren	13		
6.6 Kameraeinstellungen	14		
7. Gebrauch der Kamera	15		
7.1 Gerät einschalten	15		
7.2 Bild auslösen	15		
7.3 Maus	15		
7.4 Farbmodus wechseln	15		
7.5 LED Helligkeit einstellen	15		
7.6 Schwarz & Weiß Modus	16		
7.7 Setup-Modus	16		
7.8 Ausschalten	16		
7.9 Neustart/Reset	16		

1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieser Kamera entschieden haben.

Die folgende Anleitung wurde erstellt, um Ihnen notwendige Informationen für den Betrieb, Wartung und Einhaltung der Sicherheitsstandards zu geben.

1.1 Funktionen


- Autofokus und manueller Fokus
- Eingebaute Sensor-Maus (die Maus wird mit dem Handstück bewegt)
- Der Winkel des Kopfes ist verstellbar
- Der Kopf ist um 280° drehbar
- Die Helligkeit der LEDs ist einstellbar
- Hochwertige Lithium-Ionen Batterie
- Mit fast jeder Praxis-Software kompatibel (Bildverarbeitungs-Programm)
- Leicht zu lesendes OLED-Display
- Zahnärztliches Bildverarbeitungs-Programm enthalten (DrsViewer2)
- 3 verschiedene Farb-Modi wählbar

1.2 Beschreibung

Dieses Gerät ist eine intraorale Kamera, die dazu verwendet wird, Bilder im Inneren der Mundhöhle aufzunehmen.

1.3 Überblick

1) Kamera

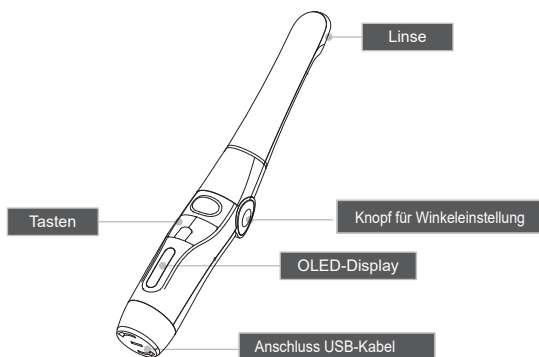

2) USB-Kabel



2.1 Konformitätsbewertung

Das Produkt wurde nach der Richtlinie 93/42/EWG der europäischen Union einem Konformitätsbewertungsverfahren unterzogen. Es entspricht den geforderten grundlegenden Anforderungen dieser Bestimmungen. Die RoHS II Richtlinie wurde umgesetzt.

2.2 Allgemeine Hinweise

Die Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Gerätes. Sie ist für den Anwender zugänglich bereitzustellen. Das Beachten der Gebrauchsanweisung ist Voraussetzung für den bestimmungsgemäßen Gebrauch und die richtige Bedienung des Gerätes. Neue Mitarbeiter müssen eingewiesen werden. Die Gebrauchsanweisung ist an Nachfolger zu übergeben.

Die Sicherheit des Anwenders/Patienten und ein störungsfreier und sicherer Betrieb ist nur bei Verwendung von Original-Geräteteilen gewährleistet. Außerdem darf nur das in der Gebrauchsanweisung aufgeführte oder von der Firma Good Doctors Germany GmbH hierfür freigegebene Zubehör verwendet werden. Bei Verwendung von nicht freigegebenem Zubehör kann die Firma Good Doctors Germany GmbH keine Gewährleistung für den sicheren Betrieb und die sichere Funktion übernehmen. Alle Ansprüche wegen hierdurch entstehender Schäden sind ausgeschlossen.

Die Firma Good Doctors Germany GmbH ist für die Geräte im Hinblick auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Funktion nur verantwortlich, wenn Reparaturen durch die Firma Good Doctors Germany GmbH oder durch eine von der Good Doctors Germany GmbH dazu autorisierten Stelle ausgeführt werden. Außerdem muss das Gerät in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung verwendet und betrieben werden.

Die Gebrauchsanweisung entspricht der Ausführung des Gerätes und dem Stand der Technik zum Zeitpunkt des ersten Inverkehrbringens. Für angegebene Schaltungen, Verfahren, Namen, Softwareprogramme und Geräte sind alle Schutzrechte vorbehalten.

Die Übersetzung der Gebrauchsanweisung wurde nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für Übersetzungsfehler kann nicht übernommen werden.

Der Nachdruck der Gebrauchsanweisung, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Good Doctors Germany GmbH gestattet.

Die Good Doctors Germany GmbH übernimmt für Schäden, die während einer Rücksendung entstehen, keine Haftung. Dies gilt auch für Rücksendungen während der Gewährleistung.

2.3 Hinweise zum Medizinprodukt

Das Produkt ist ein medizintechnisches Gerät. Es darf nur von Personen angewendet werden, die durch ihre Ausbildung oder Kenntnisse die Gewähr für eine sachgerechte Handhabung bieten.

2.4 Elektronik-Altgeräte-Entsorgung

1. Sammlung

Nutzer von Elektro- und Elektronikgeräten sind entsprechend den länderspezifischen Regelungen verpflichtet, Altgeräte getrennt zu sammeln. Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht gemeinsam mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Die getrennte Sammlung ist Voraussetzung für das Recycling und die Verwertung, wodurch eine Ressourcenschonung der Umwelt erreicht wird.

2. Rückgabe- und Sammelsysteme

Im Entsorgungsfall Ihres Gerätes darf das Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Die Good Doctors Germany GmbH hat dazu Entsorgungsmöglichkeiten geschaffen.


Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Good Doctors Germany GmbH oder Ihren Händler.

3. Entnahme des Akkus zur Entsorgung

Zur Entsorgung des Akkus wenden sich an die Good Doctors Germany GmbH oder Ihren Händler.

4. Bedeutung der Symbole

Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die mit diesen Symbolen gekennzeichnet sind, dürfen gemäß EU-Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

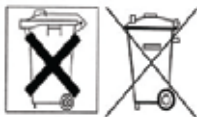

2.5 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Kamera ist ausschließlich für die Erstellung von intra- und extraoralen Aufnahmen in Zahnarztpraxen bestimmt.

2.6 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.

2.7 Verwendung von Zusatzgeräten

An die Kamera dürfen nur Zusatzgeräte (Computer) angeschlossen werden, die der Norm IEC 60950-1 (EN 60950-1) entsprechen. Die Computer-Anlage muss sich außerhalb der Patientenumgebung (1,5 m vom Patientenuntersuchungsbereich) befinden. Falls dies nicht gewährleistet ist, muss die verwendete Computer-Anlage nach IEC 60601-1 (EN 60601-1) aufgebaut werden.

3 Sicherheitsinformationen

Lesen Sie folgende Seiten vor dem Anschließen und der Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch. Wie bei allen technischen Geräten sind auch bei diesem Gerät einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit nur dann gewährleistet, wenn bei der Bedienung sowohl die allgemein üblichen Sicherheitsvorkehrungen als auch die speziellen Sicherheitshinweise beachtet werden.

3.1 Symbole



Warnung

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Personen- oder umfangreichen Sachschäden führen kann.



Achtung

Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten Personen- oder Sachschäden führen kann.

3.2 Bemerkungen und Hinweise



Bemerkung

Beachten Sie, dass mögliche Störungen auftreten können, wenn die Beschreibung ignoriert wird.



Hinweis

Die ergänzenden Informationen können die Bedienung erleichtern.

3.3 Installation und Anschluss



Warnung

- Stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss trocken und staubfrei ist.
- Schützen Sie das Handstück vor Flüssigkeiten, um einen elektrischen Schlag oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Lassen Sie das Handstück nicht fallen, um interne Defekte – die zu Überhitzungen oder Feuer führen können – zu vermeiden.
- Benutzen Sie zum Ablegen der Kamera den Kamera-Halter.
- Halten Sie USB-Kabel von Gasbrennern oder sonstigen Wärmequellen fern. Sollte das Kabel dennoch beschädigt sein, ersetzen Sie es durch ein neues, um Kurzschlüsse zu vermeiden.



Vorsicht

- Keine Verwendung oder Lagerung des Gerätes bei hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlichteinfall, die interne Schaltung kann sonst überhitzen.
- Verwenden Sie nur das Original-Zubehör (USB-Kabel, Kamera-Halter), um eine Fehlfunktion des Gerätes zu vermeiden.

3.4 Inbetriebnahme



Warnung

- Schließen Sie das UBS-Kabel nicht mit nassen Händen an, dies kann sonst zu einem elektrischen Schlag führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Personen, die einen Herzschrittmacher tragen. Es könnte zu Fehlfunktionen des Herzschrittmachers kommen.
- Aus hygienischen Gründen muss die WhicamStory3 beim Einsatz im intraoralen Bereich mit den beiliegenden Schutzhüllen verwendet werden.



Vorsicht

- Vermeiden Sie Beschädigungen oder Krafteinwirkungen am USB-Kabel, da dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen könnte.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere Zwecke als den zahnärztlichen Gebrauch.

3 Sicherheitsinformationen

3.5 Instandhaltung



Warnung

- Verwenden Sie nur Original-Zubehör, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Öffnen Sie weder Kamera, noch den USB-Stecker. Dies kann zu Verletzungen, elektrischen Schlägen oder Feuer führen.




Vorsicht


- Benutzen Sie keine Lösungsmittel wie Öl, Benzin oder Aceton zum Reinigen. Es kann zu Fehlfunktionen kommen. Beachten Sie das Kapitel Desinfektion und Reinigung.
- Benutzen Sie bei jeder Anwendung am Patienten eine neue Schutzhülle.

4 Lieferumfang


Bitte prüfen Sie den unten aufgeführten Inhalt bezüglich seiner Vollständigkeit.

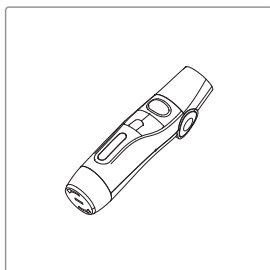


Kamerahandstück

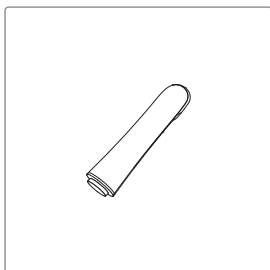


Kamerakopf

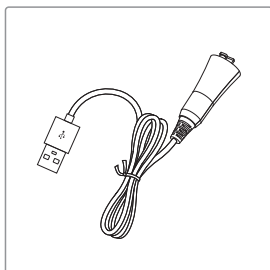


USB-Kabel

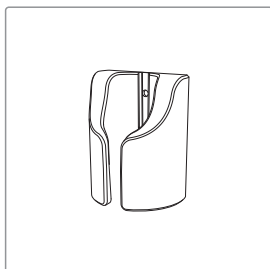


Kamerahalter

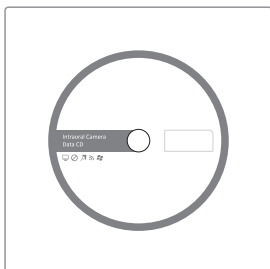

Installations-CD

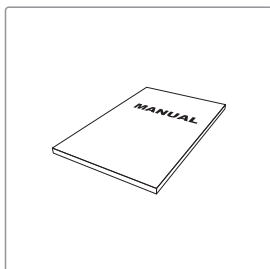


Bedienungsanleitung

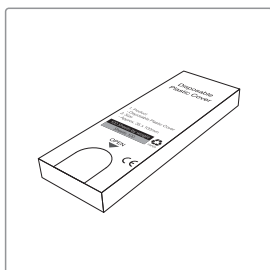

ca. 200 Schutzhüllen

5 Teile und Funktionen

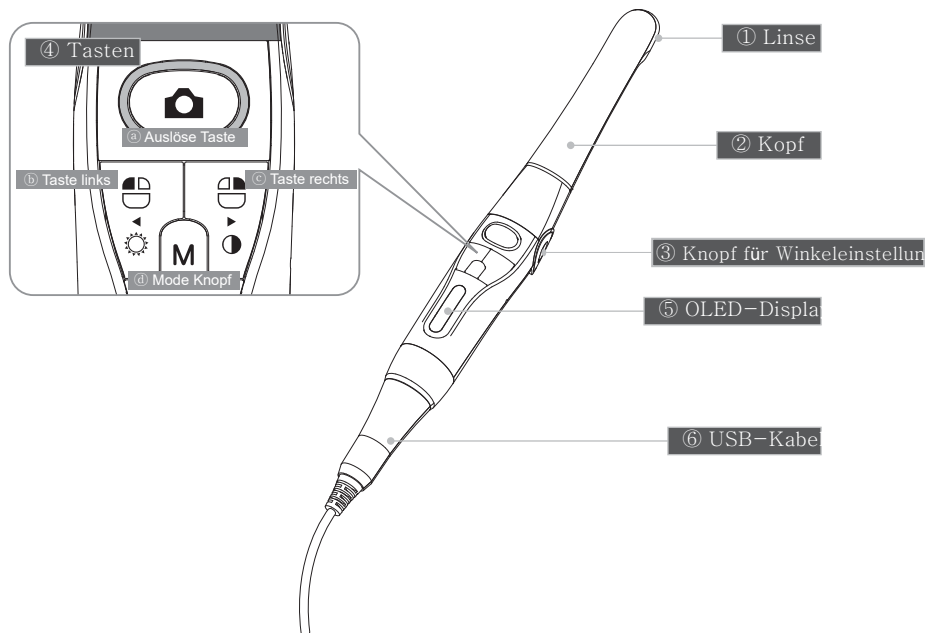

① Linse

- Das Bild wird durch ein Spiegel/Prismen-System aufgenommen
- Die Fokussierung erfolgt durch eine Flüssiglinse

② Kopf

- Kopf um 280° drehbar
- Abnehmbar

③ Knopf für Winkeleinstellung

- Verstellen Sie den Winkel der Kamera (3 Positionen)

④ Tasten

- ④ Auslösetaste
 - Bild auslösen, Fokussierung, Auswählen
- ④ Linker Knopf
 - Linke Maustaste
- ④ Rechter Knopf
 - Rechte Maustaste
- ④ Mode-Taste
 - Bewegen Sie die Maus, Setup Modus, Abbrechen

⑤ OLED-Display

- Zeigt den Status der Kamera




⑥ USB-Kabel

- Verbindet die Kamera mit dem PC


6 Installation

6.1 Kamerakopf befestigen

Verbinden Sie den Kamerakopf mit dem Handstück. Der Kopf lässt sich leicht einführen. Mit sanftem Druck schieben, bis der blaue Ring bündig sitzt.

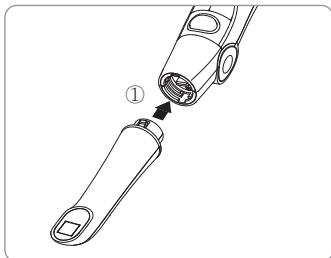

Den Kopf mit der Linse zur Tastenseite des Handstückes einführen.

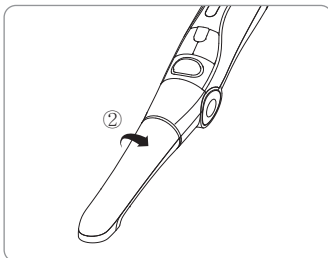

Drehen Sie den Kopf vorsichtig nach rechts.





Hinweis

Beim Hineinschieben muss die Linse in die selbe Richtung wie die Tasten zeigen.

6.2 Winkeleinstellung der Kamera

Drücken Sie auf beiden Seiten den Winkeleinstellungsknopf (Push Unlock).

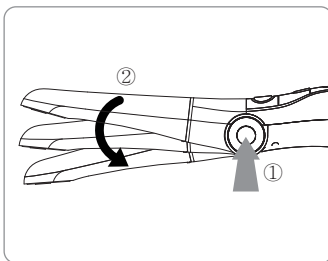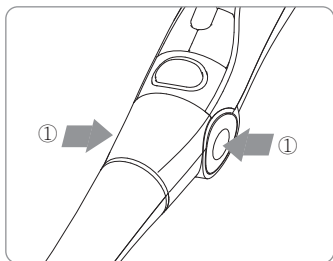


Achtung

Drücken Sie unbedingt beide Knöpfe beim Verstellen des Winkels, um einen Defekt zu vermeiden.

6 Installation

6.3. USB-Anschluss

Verbinden Sie das USB-Kabel mit der Kamera, wie im unterem Bild dargestellt.

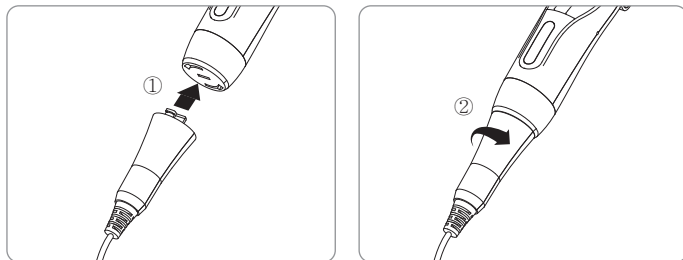


Achtung

Befestigen Sie das Kabel vorsichtig, es macht einen Klick, wenn das Kabel richtig sitzt.

6.4 Kamera mit dem PC verbinden

Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem PC. Die Kamera schaltet sich ein.

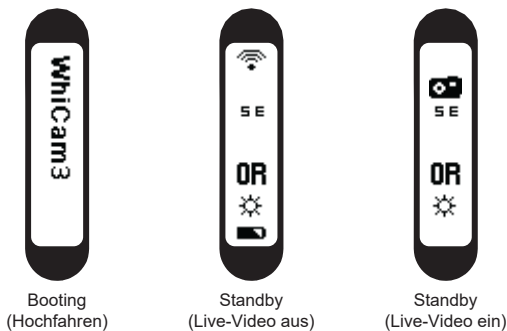

6 Installation

6.5 DrsViewer2 installieren

- Wenn Ihr Praxisprogramm keine Bildverarbeitungs-Software besitzt, benutzen Sie das auf der CD enthaltene Programm.



< Installation DrsViewer2 screen >



Hinweis

Wenn Sie die Kamera in Ihre Praxis-Software integrieren wollen, fragen Sie Ihren Händler nach einer Anleitung zur Integration.

6 Installation


6.6. Kameraeinstellungen

- Drücken und halten Sie die linke und rechte Taste gleichzeitig drei Sekunden.
Die Kamera wechselt in das Setup Menü.



Hinweis

- (a) Auslöse-Taste: auswählen/bestätigen
- (b) Linke-Taste: runter
- (c) Rechte-Taste: hoch
- (d) Mode-Taste: abbrechen

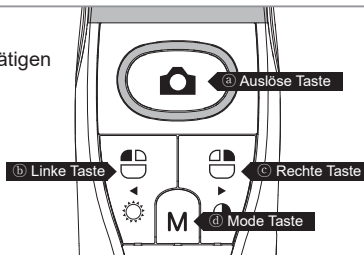

1) Auslöse-Taste festlegen (Capture)

(Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie die Kamera in DrsViewer2 verwenden wollen).

- Wählen Sie die für Ihre Software vorgesehene Auslösetaste (wenn Sie diese nicht wissen, fragen Sie Ihren Händler).
- Standardmäßig ist die Leertaste eingestellt.



Hinweis

Am einfachsten wechseln Sie die Auslösetaste mit dem auf der CD enthaltenen Programm "HID Drs Manager".

2) Maus-Geschwindigkeit (Mouse Speed)

- Wählen Sie die Geschwindigkeit der Maus (5 Stufen).
- Voreingestellt ist Stufe 3.

3) Abschaltzeit bei Nicht-Benutzung (Turn off time)

- Wählen Sie, wann sich die Kamera ausschalten soll (nach 5, 10, 15, 20, 30 Minuten).
- Voreingestellt sind 5 Minuten.

4) Autofokus (Auto Focus)

- Wählen Sie "Disable" oder "Enable" (Ausschalten oder Einschalten).
- Standardmäßig ist der Autofokus ausgeschaltet (Disable).



Hinweis

- Full autofocus (Enable): Der Fokus stellt sich automatisch scharf.
- Semi autofocus (Disable): Die Kamera stellt automatisch scharf, wenn Sie den Auslöseknopf leicht berühren.

5) Beenden und Speichern der Kameraeinstellungen (Setup Menü)

- Drücken Sie die Auslösetaste um Änderungen zu speichern.
- Drücken Sie die Taste M (Mode Taste) um die Kameraeinstellungen zu verlassen.


7 Gebrauch der Kamera

7.1. Gerät einschalten

- Drücken Sie die Auslöse-Taste. Die Kamera schaltet sich ein, die LEDs blinken und es ertönt ein Ton.

7.2. Bild auslösen

- Drücken Sie auf das Kamera-Symbol in DrsViewer2. Es erscheint ein Live-Bild/Video.
- Berühren Sie die Auslösetaste leicht, dann stellt die Kamera scharf. Halten Sie die Auslösetaste nach dem Scharfstellen weiter fest, so löst die Kamera nach einer Sekunde aus. Ein sofortiges Auslösen durch festes Drücken ist möglich. Wenn Sie den Autofokus eingestellt haben, können Sie das Bild nicht manuell scharf stellen. Sobald Sie die Kamera ruhig halten, stellt die Automatik scharf.

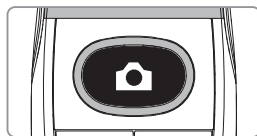


Hinweis

Voreingestellt ist der Semi-Autofokus, die Auslösetaste ist die "Leertaste". Wenn Sie die Kamera in Ihre Praxis-Software integrieren möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die Good Doctors Germany GmbH.


7.3. Maus

- Wenn Sie den Mauszeiger bewegen möchten, drücken und halten Sie die Mode-Taste und bewegen Sie die Kamera. Der Mauszeiger bewegt sich dann in die Richtung, in die Sie die Kamera bewegen.

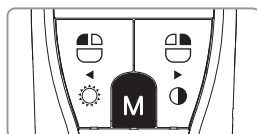



7.4. Farbmodus wechseln

- Drücken Sie die Mode- und Auslöse-Taste im LiveBild/Video-Modus. Der Farbmodus wechselt. Es gibt drei Farbmodi, Voreingestellt ist "Original".
- Original ⇒ Warm ⇒ Cool

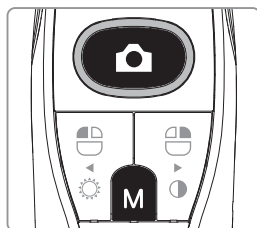

7.5. LED-Helligkeit einstellen.

- Drücken Sie die Mode- und linke Taste im Live-Bild/Video-Modus. Die LED Helligkeit wechselt.

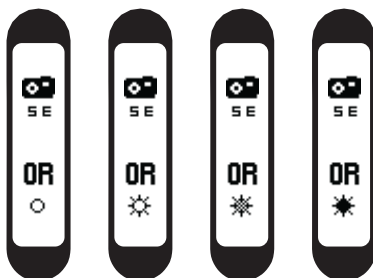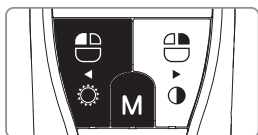

Ausschalten ⇒ Helligkeit LV1 ⇒ Helligkeit LV2 ⇒ Helligkeit LV3.





Hinweis

Die Helligkeit kann nur im Live-Modus geändert werden. Nützlich z.B., wenn Sie mit einer Brillenlampe arbeiten.

7 Gebrauch der Kamera

7.6. Schwarz & Weiß Modus

- Drücken Sie die Mode- und die rechte Taste im LiveBild/Video-Modus.
- Die LEDs schalten sich aus und das LiveBild wechselt zum Schwarz & Weiß Modus.

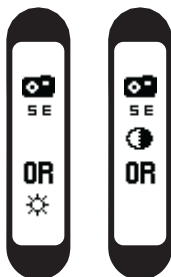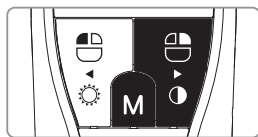

Normal ⇒ Schwarz & Weiß Modus.




Hinweis

Der Schwarz & Weiß Modus kann nur im Live-Modus eingestellt werden, er kann z.B. zum Ablichten von analogen Röntgenfilmen verwendet werden.


7.7. Setup-Modus

- Drücken Sie die linke und rechte Taste für 3 Sekunden.
- Das Setup-Menü wird angezeigt.
- Für genauere Informationen zum Setup-Modus lesen Sie bitte "5. Installation ⇒ 6. Kamera Einstellungen."

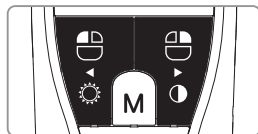

7.8. Ausschalten


- Drücken Sie die Auslösetaste für 3 Sekunden, das Gerät schaltet sich aus.
- Das Gerät schaltet sich automatisch nach der voreingestellten Zeit ab.

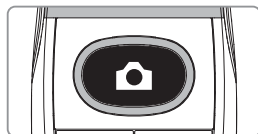

Hinweis

- Voreingestellt sind 5 Minuten, Sie können die Zeit aber auf 10, 15, 20, 25 oder 30 Minuten ändern.
- Wenn die Kamera in die Hand genommen wird, schaltet sich die Kamera wieder ein.

7.9. Neustart/Reset

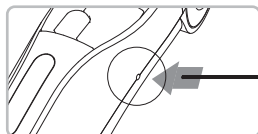

- Wenn die Kamera nicht mehr reagiert, können Sie ein Reset durchführen. Den Reset-Knopf finden Sie auf der rechten Kamera-Seite. Drücken Sie den Reset-Knopf vorsichtig mit einer stumpfen Nadel.

8.1 Desinfektion und Reinigung

- Verwenden Sie die Kamera nur mit den mitgelieferten Schutzhüllen, um eine hygienische Behandlung zu garantieren. Dies verhindert auch ein Eindringen von Flüssigkeiten in das Gerät, da die Kamera nicht wasserfest ist.
- Die Kamera und Zubehör können mit handelsüblichen Desinfektionstüchern mittels Wischdesinfektion gereinigt und desinfiziert werden, z.B. Dürr FD350.
- Achten Sie darauf, dass die Tücher nur feucht, nicht nass, sind. Das Desinfektionsmittel nicht direkt auf die Kamera sprühen. Das Desinfektionsmittel darf nicht in das Gerät gelangen! Beachten Sie die notwendige Einwirkzeit laut Herstellerangabe.
- Damit die Oberfläche des Handstückes nicht beschädigt wird, dürfen keine scharfen und abrasiven Reinigungsmittel verwendet werden.
- Die Kamera **nicht** autoklavieren, keine Tauch- oder Sprühdesinfektion durchführen.

8.2 Wartung

- Die Kamera ist wartungsfrei.
- Schrauben Sie das Gerät nicht auf, da die Garantie sonst verfällt.

9 Fehlersuche und Beseitigung

Wenn die Kamera nicht richtig funktioniert, folgen Sie bitte den Anweisungen.

Problem	Ursache und Lösung
Taste funktioniert nicht	Wenn Sie die Taste zu fest drücken, funktioniert diese nicht. Die Taste muss nur leicht berührt werden. Wenn die Kamera nicht mit dem PC verbunden ist oder nicht richtig erkannt wurde, funktionieren auch die Tasten nicht. Überprüfen Sie "5. Installation", "6. Gebrauch der Kamera". Die Auslöse-Taste für Ihr Praxisprogramm ist falsch eingestellt. Wenden Sie sich an Ihren Händler.
Das Display der Kamera funktioniert nicht	Überprüfen Sie die USB-Verbindung.
Die Kamera geht während der Aufnahme aus	Wenn das USB-Kabel nicht richtig angeschlossen ist, kann es sein, dass sich das Gerät ausschaltet. Überprüfen Sie das USB-Kabel.
Es kann kein Bild ausgelöst werden	Wenn die Auslöse-Taste in Ihrer Praxis-Software nicht funktioniert, wurde diese nicht oder falsch eingestellt. Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler nach der richtigen Tastenkombination.
Kein Live-Bild	Wenn die Kamera nicht richtig mit dem PC verbunden ist, gibt es kein Live-Bild. Überprüfen Sie "5. Installation", "6. Gebrauch der Kamera". Wenn Sie eine Webcam oder eine TV-Karte angeschlossen haben, deaktivieren Sie diese und überprüfen Sie, ob das Problem behoben wurde. Wenn Sie die Kamera in Ihrer Praxis-Software laufen lassen, achten Sie darauf, dass Sie die richtige Kamera ausgewählt haben. Deaktivieren Sie gegebenenfalls andere Kameras (Webcam, etc.). Die Kamera unterstützt nur das MJPG (MPEG) Format. Wenn Sie die Kamera in Ihrer Praxis-Software verwenden, überprüfen Sie bitte die Einstellungen. Einige CODECS blockieren oder verzögern das Live-Bild. Deinstallieren Sie den CODEC (z.B. k-lite codec etc.).

* Wenn Ihr Fehler hier nicht aufgeführt ist, kontaktieren Sie bitte den Händler Ihrer Kamera oder die Gruneworld GmbH (www.GoodDrs.de).

10 Spezifikation

■ Geräteklasse

Modell:	IC-WHT61
Handelsmarke:	Whicam Story3
Stromversorgung:	5V USB-Anschluss
Schutzart (DIN EN 60529):	IPX0
EMV (elektromagnetische Verträglichkeit):	IEC60601-2
Sicherheit:	IEC60601-1
Schutzklasse	Anwendungsteil Typ BF

■ Betriebsumgebung

Temperatur:	16°C bis 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% bis 80%
Luftdruck:	500 hPa bis 1060 hPa

■ Transport- und Lagerumgebung

Temperatur:	-20°C bis 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% R.H. bis 85% R.H.
Luftdruck:	500 hPa bis 1060 hPa

■ Zusätzliche Informationen

Kamera (Inklusive Kopf)	Betriebsspannung:	3.7V
	Abmessungen:	ca. 210 x 31 x 37 mm
	Gewicht:	ca. 75g
	Auflösung:	1280 x 720
	Sensor/Linse:	CMOS / Liquid lens
Schutzhüllen	Abmessungen:	ca. 32 x 100 mm
	Anzahl:	ca. 200 Stück
	Material:	Polyäthylen
USB-Kabel	Länge:	ca. 3 Meter

■ Minimale Systemanforderungen


Je besser der Monitor und die Grafikkarte, desto besser ist auch das Bild. Eine gute Kamera kann keine guten Bilder anzeigen, wenn der PC diese nicht wiedergeben kann.

PC System:	2.0 Ghz CPU, 4 GB RAM
Betriebssystem:	ab Windows XP service pack 2 (Windows XP 64 bit wird nicht unterstützt)
USB Anschluss:	ab USB 2.0


(Bei der erstmaligen Installation kann es sein, dass Windows auf das Internet für die Treiber zugreifen muss).

* Die Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.


11 Zubehör

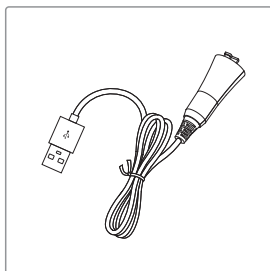

USB-Kabel

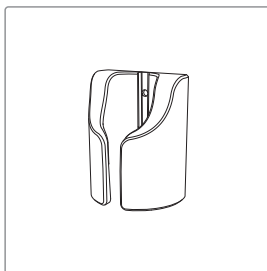

Kamera-Halter

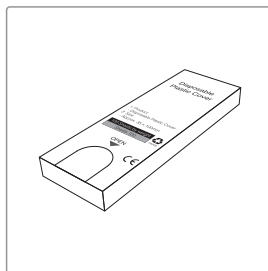

Schutzhüllen
(ca. 200 Stück)

12 Garantie

Wir bieten Ihnen 12 Monate Garantie auf dieses Produkt. Ausgeschlossen sind Verbrauchsmaterialien. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Die Kamera und der Kamerakopf haben einen Schocksensor, so dass nachvollzogen werden kann, wenn die Kamera heruntergefallen ist.

Serien Nummer überprüfen.



Serien Nummer überprüfen.

S/N : WHT 07140001



Good Doctors Germany GmbH

Gerhard-Domagk-Str.2, 53121 Bonn, Germany

TEL: +49(0)228/53 44 14 65 FAX: +49(0)228/53 44 14 66

Website: www.gooddrs.de E-mail: info@gooddrs.de




Good Doctors Co., Ltd.

#208, B-Dong, 283, Bupyeong-daero, Bupyeong-gu,
Incheon, Korea (Cheongcheon-dong, Woolim Lions Valley)
(Zip code: 403-911)

Tel: + 82 32 424 6325 Fax: + 82 32 424 6326

E-mail: info@gooddrs.com Website: www.gooddrs.com

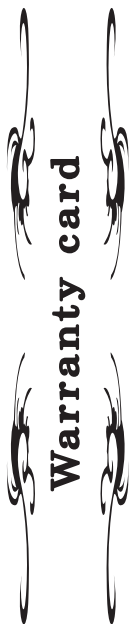

We guarantee the quality of the product as follows

Name of product :

Name of model :

Customer information

- Office name :
- Office phone :

Distributor

- Dealer name :

Assurance period

- Date of purchase : from , , 20
- Product is for 1 year except accessories.

< Assurance details >

1. If there is any defect of manufacturer or product has any fault itself within the assurance period, it will be replaced with the same product.
2. Below cases are not effective for the free refund.
 - Malfunction and damage according to user's carelessness,
 - Malfunction and damage according to natural disaster such as fire, earthquake and flood etc.
 - Malfunction and damage according to user's intention or accident.
 - Malfunction and damage according to using incompatible product.
3. The manufacturer does not accept any liability resulting misuse.



Good Doctors Co., Ltd.

#208, B-Dong, 283, Bupyeong-daero, Bupyeong-gu, Incheon, Korea (Cheongcheon-dong, Woolim Lions Valley) (Zip code : 403-911)
Teli: +82 32 424 6325 Fax: +82 32 424 6326

